

AirFeel®

La nueva gimnasia respiratoria.





AirFeel® Mod: P0920EM

Basándose en la experiencia de Flaem en el diseño y fabricación de dispositivos médicos de alta calidad, AirFeel® emerge como un dispositivo médico avanzado que utiliza la terapia respiratoria para tratar afecciones agudas o crónicas del tracto respiratorio inferior asociadas con la acumulación de moco y secreciones.



1

GIMNASIA RESPIRATORIA. QUÉ ES Y CÓMO SE HACE.

Un dispositivo que proporciona resistencia durante la espiración aumenta la presión interna dentro de las vías respiratorias, facilitando la expulsión del exceso de moco. AirFeel® está indicado para cualquier persona con problemas respiratorios obstructivos: pacientes con enfermedades crónicas y capacidad pulmonar reducida, personas encamadas con movilidad pulmonar limitada, personas con enfermedades respiratorias crónicas o no crónicas y, en general, es adecuado para cualquier persona que necesite mejorar su capacidad respiratoria eliminando la congestión de moco.




2

PEP Y OPEP. AQUÍ ES DONDE ESTÁ LA DIFERENCIA.

AirFeel® se basa en la integración de dos modos de uso, permitiendo dos terapias diferentes integradas en un solo dispositivo, y la transición de uno a otro es extremadamente fácil.



Posición | Terapia PEP

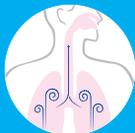

Cuando el mando se gira a la posición 'cerrado', bloquea la esfera interior y dirige el aire solo a través del orificio seleccionado en el anillo. La resistencia respiratoria se puede ajustar con precisión a través de 5 niveles de intensidad diferentes. Como dispositivo de presión espiratoria positiva (PEP), AirFeel® ayuda a mejorar la limpieza de las vías respiratorias inferiores al promover la ventilación colateral, aumentando así temporalmente la capacidad funcional residual de los pulmones.

Posición | Terapia OPEP



Cuando el mando se gira a la posición 'abierto', el dispositivo realiza una terapia OPEP: la combinación de la terapia PEP con la oscilación de la esfera interna crea una presión espiratoria positiva oscilante (OPEP) que evita el colapso dinámico de las vías respiratorias. El aumento de la ventilación alveolar combinado con el movimiento oscilatorio del aire reduce las propiedades viscoelásticas del moco, lo que facilita su movilización y facilita la eliminación de secreciones.



**VÍAS
RESPIRATORIAS
OBSTRUIDAS**



**TERAPIA PEP:
PRESIÓN POSITIVA
FACILITA LA
ELIMINACIÓN
DE SECRECIONES.**



**TERAPIA OPEP:
LA VIBRACIÓN FACILITA
LA ELIMINACIÓN
DE MOCO.**



**VÍAS
RESPIRATORIAS
DESPEJADAS**



3

ERGONOMÍA TODO EN UNA MANO.

AirFeel® es portátil, fácil de usar y fácil de limpiar. El ángulo del mango ha sido diseñado para promover el uso correcto del dispositivo y su facilidad de uso. AirFeel® es fácil de desmontar, limpiar y volver a montar porque consta de pocas piezas. Está hecho de polipropileno, que es fácil de esterilizar. Todos los componentes son esterilizables en autoclave. El mango se puede quitar y usar para almacenar los componentes del producto, lo que lo hace muy fácil de transportar.

AirFeel® ha sido estudiado y diseñado para llevar la ergonomía a cada detalle, incluso el más pequeño.



Pocas piezas, fácil de desmontar y volver a montar.

4

UN DISPOSITIVO ÚNICO, CONECTABLE AL NEBULIZADOR.



No solo terapia respiratoria: la terapia PEP y OPEP también se puede complementar con el uso de fármacos.

De hecho, AirFeel® se puede utilizar en combinación con nebulizadores Flaem y se puede conectar a nuestros nebulizadores RF9, RF7 Dual Speed y RF7 Dual Speed Plus.



5

UNA GIMNASIA RESPIRATORIA PROFESIONAL Y SUPERVISADA.



Gracias al uso del manómetro, el médico puede realizar un seguimiento del progreso de la terapia y controlar el estado del paciente durante el tratamiento.



AirFeel®:
Cod. ACO754P

AirFeel Pro Kit:
Cod. ACO755P

Kit de tubos de un solo uso:
Cod. ACO775P



FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 225 - 25015
Desenzano del Garda - Brescia (Italy)
Phone: (+39) 030 9910168
Email: info@gruppoflaem.it
www.gruppoflaem.it





AirFeel®

FLAEM®
Medical Devices



Escanee con su teléfono móvil y mire el video de AirFeel®.

www.flaem.eu



COD. 20745 REV. FECHA 07/2024 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A.
FLAEM NUOVA se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y funcionales a este producto sin previo aviso.